

Suction Clean

Zusatzreiniger für dentale **Absauganlagen**

- · hohe Reinigungskraft
- schaumarm



Präparatetyp

Schaumarmes Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen.

Zusammensetzung

Organische Säuren, < 5 % Phosphonate.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, gelbliche Lösung pH-Wert: ca. 1,7 +/-0,5 Dichte (20°C): ca. 1,058 g/ml

Anwendungsgebiete

Zur regelmäßigen, zusätzlichen Reinigung von dentalen Absauganlagen, Mundspülbecken und Abflussschläuchen.

Anwendung

SafeLine Suction Clean ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Je nach Verschmutzungsgrad 50 ml bis 100 ml SafeLine Suction Clean mit Wasser auf 1 Liter auffüllen. Zur Reinigung 2 Liter Lösung frisch ansetzen (Reinigung z.B. in der Mittagspause durchführen). 2/3 der gebrauchsfertigen Lösung durch die Saugschläuche saugen, 1/3 der Lösung ins Mundspülbecken kippen. Die beste Reinigungswirkung wird bei einer Einwirkzeit von ca. 1,5 bis 2 Stunden erzielt. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen, um gelöste Verschmutzungen komplett aus den Schläuchen zu entfernen. Die Reinigungslösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen. Anwendungsanleitung siehe detaillierte Produktinformation. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Dosierung/Einwirkzeiten

Bei normaler arbeitsmäßiger Verschmutzung: 5 % (50 g/L). Bei übermäßig starker Verschmutzung: bis 10 % (100 g/L). Einwirkzeit: 1,5 bis 2 Stunden, je nach Verschmutzungsgrad

Lieferformen

Einzelpackung 5 Liter Kanister Verkaufseinheit 1 x 5 L

Ref.-No. 09982

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Glycolsäure (Hydroxyessigsäure); 1-Hydroxyethan-1,1diphosphonsäure. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



AMPri Handelsgesellschaft mbH Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de

